

# Asterisk

---

## Istruzioni per la prima regolazione ed utilizzo di Cell

La corretta regolazione di "CELL" è fondamentale per garantire che la ginocchiera svolga nel migliore dei modi il compito per cui è stata realizzata. Qualora la ginocchiera non venisse regolata adeguatamente, si potrebbero verificare dei problemi e dei danneggiamenti al sistema di snodo ed alla struttura. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Per la corretta regolazione seguite punto per punto le istruzioni abbinata alle immagini sul piccolo pieghevole contenuto nella scatola: nella busta trasparente trovate anche i cuscinetti di vari spessori, la chiave esagonale lo speciale cacciavite ed il tagliando di garanzia che dovrà essere spedito all'indirizzo indicato entro 7 giorni dall'acquisto allegando copia dello scontrino fiscale e/o della fattura di acquisto, pena il decadimento della garanzia.

1. **APRIRE LA GINOCCHIERA:** Prima di indossare la ginocchiera sciogliete i lacci posteriori ed allentateli il più possibile.
2. **CALZARE LA GINOCCHIERA:** Indossate la sottocalza e la ginocchiera stando seduti: la posizione più corretta della ginocchiera è quella che permette il libero movimento del ginocchio: pochi millimetri troppo alta o troppo bassa, possono infastidire e/o frenare il libero movimento. Verificate lo spessore dei cuscinetti da inserire in modo che la ginocchiera effettui una leggera pressione sul ginocchio ed eventualmente sostituiteli con quelli che trovate nella confezione.
3. **FISSARE LA GINOCCHIERA:** Agganciate la ginocchiera iniziando dai gancetti centrali in prossimità dello snodo (prima quello inferiore) e tendete i lacci con molta cura in modo che non siano né troppo tesi né troppo allentati e provvedete a bloccarli con la speciale chiusura. Consigliamo di non tagliare i lacci a questo punto della regolazione in quanto potrebbe essere necessario rivedere la tensione degli stessi. Effettuate le ultime regolazioni indossando gli stivali.
4. **REGOLARE LA GINOCCHIERA:** Usando il cacciavite in dotazione effettuate le regolazioni in modo che i due "braccetti" superiore ed inferiore aderiscano perfettamente a gamba distesa. Agendo sulle due viti è possibile variare anche l'inclinazione del braccetto in funzione della muscolatura del quadricipite femorale. Evitate nel modo più assoluto di "tendere" eccessivamente il braccetto, poiché non è la chiusura del braccetto che mantiene la ginocchiera nella sua posizione, ma la chiusura posteriore. L'eccessiva tensione del braccetto, può provocarne la rottura.
5. **FERMO ESTENSIONE:** Asterisk "Cell" è studiata per prevenire gli infortuni, tuttavia è ottima anche in caso di infortunio già esistente. All'occorrenza è possibile agire sul blocco dell'estensione utilizzando lo speciale cacciavite in dotazione: la regolazione deve essere la medesima su entrambi i lati della ginocchiera. In assenza di problemi si consiglia comunque di controllare il posizionamento dei fermi verificando che siano posizionati sull'ultima tacca in basso (estensione a 180°): si raccomanda di non limitare l'estensione inutilmente: l'impedimento di un'adeguata distensione dello snodo potrebbe pregiudicare la sicurezza oltre che provocare dei danni allo snodo e limitarne la durata nel tempo. E' bene ricordare che se lo snodo prende gioco va sostituito prima che danneggi le sedi nella struttura della ginocchiera.
6. **SISTEMA ANTI TORSIONE:** (opzionale) Per utilizzare il sistema antitorsione è necessario effettuare una incisione nella parte più bassa del pantalone per permettere il passaggio del laccetto. Per smontare il laccetto utilizzate la chiave esagonale fornita nella confezione.
7. **FISSAGGIO ALLO STIVALE:** Se decidete di utilizzare il sistema antitorsione è necessario che fissiate allo stivale il laccetto mediante il ribattino presente sul laccetto stesso. Il sistema lega lo stivale alla ginocchiera aumentando sensibilmente la protezione in caso di torsione.

**Pulizia e manutenzione.** Le presenti raccomandazioni rivestono carattere generale: la frequenza della pulizia dipende dal tipo di utilizzo della ginocchiera stessa. Si consiglia di effettuare la pulizia dello snodo centrale con acqua corrente, assicurandosi di espellere poi l'acqua con aria compressa: è consigliabile pulire la ginocchiera utilizzando aria compressa e un panno umido. I lacci, l'avvolgimento posteriore sono lavabili in acqua tiepida, a mano e non in lavatrice. Prima di ogni utilizzo è bene verificare le condizioni dei lacci di tensione, dei gancetti di chiusura e della struttura di "Cell": solo se tutti i particolari sono perfettamente funzionali, la ginocchiera garantisce il massimo delle prestazioni.

Il sistema di snodo ha una durata standard di circa un anno e mezzo: il periodo indicato è tuttavia indicativo in quanto varia dalla frequenza di utilizzo della ginocchiera: quando lo snodo prende un gioco eccessivo, va sostituito. La mancata sostituzione dello snodo può comportare l'usura eccessiva della struttura ed il conseguente danneggiamento della stessa.

Il sistema di snodo di Asterisk Cell è coperto da brevetto internazionale ed è l'unico ad effettuare il movimento laterale. Proprio per questo motivo, essendo un meccanismo tecnologicamente complesso è soggetto ad usura al pari di una parte speciale della vostra moto e necessita di essere controllato e sostituito all'occorrenza.

Asterisk non si assume nessuna responsabilità per infortuni o danni subito dall'uso di Cell.

**Garanzia.** Il tagliando di garanzia contenuto nella confezione deve essere inviato **entro 7 giorni** dall'acquisto compilato ed in busta chiusa, indicando tutti i dati dell'acquirente.

E' necessario allegare anche copia dello scontrino e/o copia della fattura di vendita. In mancanza di anche solo uno dei dati, Asterisk Italia non si assume la responsabilità della mancata registrazione della garanzia. Asterisk Italia provvederà a sostituire o riparare a proprio insindacabile giudizio le ginocchiere ritenute assemblate in modo incorretto o con materiali difettosi. La garanzia copre per 1 anno la struttura della ginocchiera, non copre tuttavia i problemi derivanti da usura dei componenti e/o danni provocati da cadute e/o incidenti. Il mancato invio del tagliando di garanzia entro i termini previsti comporterà il decadimento della garanzia.

In caso di problemi rivolgetevi al punto vendita in cui avete effettuato l'acquisto: non inviate le ginocchiere ad Asterisk Italia senza prima aver ricevuto il numero di autorizzazione all'invio. Tutte le parti che compongono "Cell" sono acquistabili come ricambio presso i punti vendita.

Ogni ginocchiera è provvista di un codice identificativo, non rimuovetelo in quanto sarà necessario verificarlo per gli interventi in garanzia.

Per ogni tipo di informazione non esitate a contattare il nostro servizio clienti.  
Asterisk Italia / Motec Racing - info line 0428 40720 - [www.asteriskitaly.com](http://www.asteriskitaly.com)